

# 木製車椅子『WINKLE2003』車輪取付け説明書

当社の車椅子をご購入ありがとうございます。梱包品の確認をお願いいたします。  
持ち運びができるように、着脱式デザイン設計になっておりますので、御活用ください。

梱包パーツ



車椅子本体 1体



タイヤ部 2体 車軸金具 2本



①

取り付けは（写真①）車輪の木製ハンドリム側より車輪中央穴に車軸金具を差し込みます。本体の軸穴（写真②）に、車軸をセットした車輪を入れます。軽い力で入りますので、そのまま押し入れれば固定されます。（少しカチッと音がする程度）

取り外しは、車軸金具の中央のボタンを押すと外れますので、本体が倒れないようにタイヤをはずしてください。



②

悪い例

差込が足りない



正しい例



後側から確認



片側の車輪をセットしたら、安定しますので、2つめの車輪を同じようにセットしたら完成です。  
最後まで車軸金具が差し込まれて固定されているかをご確認ください。



完成



WINWOOD 株式会社 ウィンウッド

TEL/0243-23-0923 FAX/0243-23-0924 e-mail : info@win-wood.co.jp